

マスクの着用と作業性を楽にするマスク用スペーサー

# マス楽<sup>TM</sup>

M A S U R A K U

日本製

## 鼻・口まわりに 空間をつくり ストレスを軽減!

現場で戦う人達を感染症対策と熱中症対策の2つのリスクから守るために長時間の着用と作業性を考え抜いたマスク用スペーサーです。

湿度の急上昇を  
防止

長時間でも  
楽な着け心地

息がしやすく  
喋りやすい

柔らかくすべりにくい  
エラストマー素材

実用新案出願済



# マスクの様々な悩みを解決する マスク用スペーサー「マス楽™」登場!


マスクに簡単に取り付けができ、息がしやすく、温度・湿度を下げます。  
柔らかい素材で着け心地もよく、長時間でも快適に過ごせます。




## 医療用素材 エラストマーAR／スチレン系の特徴

- 滑りにくい特性があります。
- 架橋ゴムやオレフィン系エラストマーと比較し、臭気が少ない製品です。
- 他シリーズと比較し、衛生性が高くなっています。(食品衛生法・日本薬局方に適合)
- シリコンゴム代替に適しています。


## 使用方法

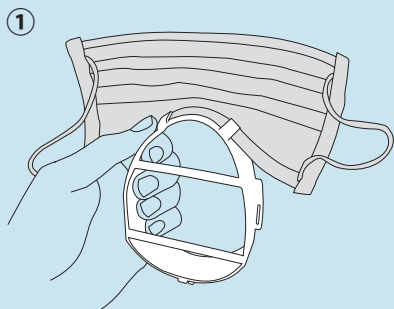

マスクを裏返し  
上フックに差し込みます。

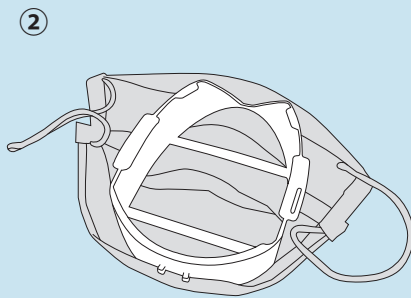

マスクを本体に被せて  
下フックに差し込みます。

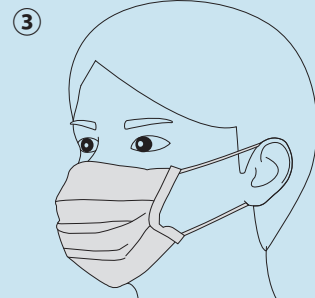

鼻と顎にかかるように位置を  
調整して装着してください。

●材質: AR-800シリーズ エラストマーARスチレン系／スチレン系 ●重量: 約13g



使用上・保管上の  
注意

●用途以外に使わないで下さい。 ●初めてお使いの前に、中性洗剤にてよく洗ってください。 ●万一、かゆみ・かぶれ等の症状があらわれた場合は、すぐに使用を中止して下さい。 ●乳幼児の手が届かない所に保管して下さい。 ●直射日光が当たる場所や高温多湿な場所での保管は避けて下さい。 ●本製品は清潔な状態でご使用ください。汚れた場合はすみやかに洗浄してください。 ●未使用時は、清潔な容器で保管してください。 ●本製品は感染症、熱中症等を防止するものではありません。

■お問い合わせ先

建ロボテック株式会社

〒761-0823 香川県木田郡三木町大字井戸1577-1

URL <https://www.soku-tetsu.com/>

マス楽 <https://www.soku-tetsu.com/product/masuraku.php>

E-mail [support@kenrobo-tech.com](mailto:support@kenrobo-tech.com)

■販売店様欄

